


## 1. Positionnement initial

Insérer les sangles vers le bas dans les fentes pour sangles du côté opératoire en veillant à ce que les étiquettes blanches soient orientées vers l'intérieur.


Placer the RAMP sur la section pour jambes de la table d'opération sous la jambe opérée, le tendon d'Achille reposant sur le repose-pied le plus élevé.

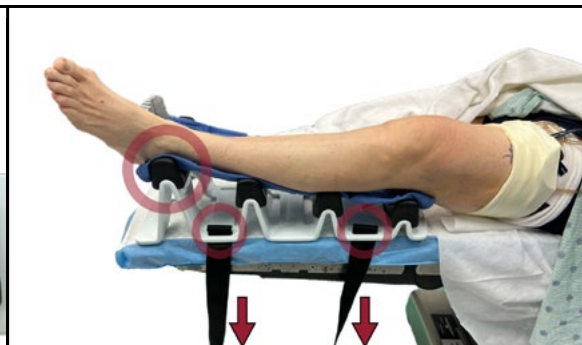

## 2. Ajuster la position

Ajuster légèrement la position selon les préférences du chirurgien.

*Dans certains cas, une flexion de 90 degrés est souhaitée pour le pied reposant sur le 3ème repose-pied.*

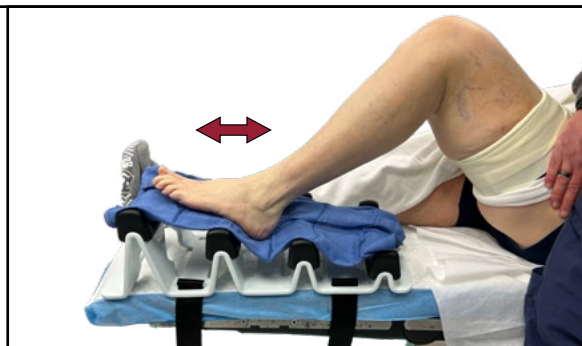

## 3. Fixation des sangles

- Passer les sangles sous la table d'opération ou sous une section spécifique pour jambes.
- Faire passer les sangles par les fentes côté intérieur, puis fixer fermement le Velcro.




\*Scanner ce code pour visualiser la fixation des sangles en [vidéo](#)



## 4. Support latéral


Positionner le support latéral de manière à ce que le genou reste droit en extension et en hyperflexion.

*Dans certains cas, le placement d'une cale en mousse sous la hanche opérée ou non opérée peut augmenter la stabilité.*

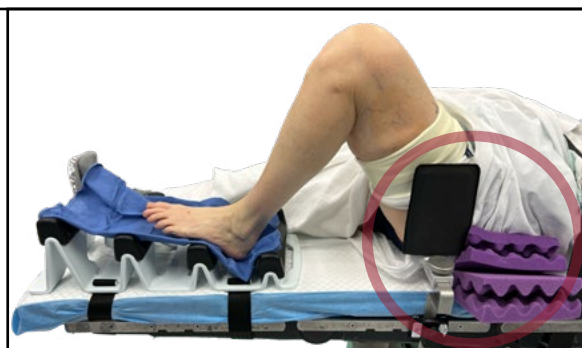

## 5. Drapage

Tirer les couches de drapage vers le bas entre les repose-pieds pour permettre au talon de reposer facilement dans toutes les positions.

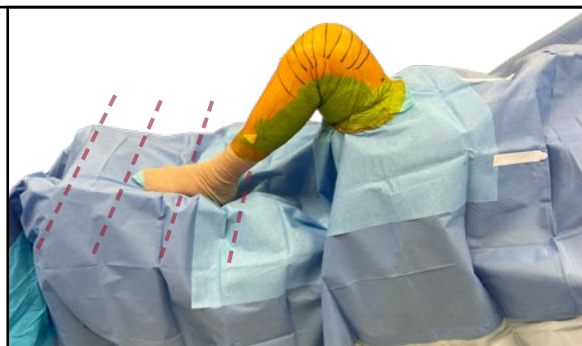

Besoin du guide technique  
dans une autre langue ?

**Scannez ici !**

